

• توجه

- دستورالعمل کاربری را قبل از استفاده بدقت مطالعه نمایید.
- همه ی هشدارها و نکات گفته شده را مشاهده نمایید. عدم انجام این امر ممکن است باعث ایجاد عوارضی شود.

• شرح وسیله:

کتترهای گایدینگ، کتترهای داخل عروقی یکبار مصرف، استریل و غیرقابل بازیافت هستند که امکان هدایت وسایلی دیگر هم چون بالن و استنت را فراهم می کنند.

• موارد استفاده:

کتترهای گایدینگ به منظور ارسال و هدایت وسایل دیگر به عروق کرونر و یا پریفرال مورد استفاده قرار می گیرند. قطر داخلی بیشتر این نوع کتتر نسبت به کتترهای تشخیصی این امکان را فراهم می کند.

• موارد عدم استفاده:

مشخص نیست (نامعلوم)

• هشدارها:

این وسیله فقط برای استفاده بصورت یکبارمصرف طراحی و در نظر گرفته شده است. از بکارگیری مجدد آن خودداری کنید زیرا می تواند به طور بالقوه منجر به نقص عملکرد وسیله و افزایش خطر آلودگی و عفونت شود.

از مواد حاجبی هم چون اپیودل و لیبیودل که باعث جدا شدن قسمت های مختلف کتتر از هم می شود استفاده نکنید.

در صورت مقاومت در حرکت رو به جلو در کتتر، بدون مشخص شدن علت و انجام اقدامات اصلاحی، سیسم راهنما یا هر جزء دیگر را پیش نبرید.

• موارد احتیاط:

- در صورت باز شدن یا آسیب دیدن بسته بندی، از آن استفاده نکنید.

- بعد از تاریخ انقضا استفاده نکنید.

- اتوکلاو یا استریل مجدد نکنید.

- با گرفتن هاب و بیرون آوردن آهسته آن از بسته، کتتر را با دقت از بسته بندی خارج کنید.

- قبل از استفاده از کتتر، آن را به خوبی بررسی کنید که اندازه و شکل آن مناسب با هدف می باشد.

- اگر هنگام بیرون کشیدن سیسم راهنما از کتتر مقاومت احساس میشود، سیسم راهنما و کتتر را به صورت یک واحد با هم بیرون بکشید تا از آسیب احتمالی به دیواره رگ جلوگیری شود.

قبل از استفاده، تمام وسایل ورودی به داخل عروق خونی را با سرم سالین هیپرتونیک مشابه تستشو دهید.

• عوارض جانبی

تنها پزشکان آموزش دیده باید از کتترهای گایدینگ داخل عروقی استفاده کنند.

عوارضی که ممکن است با استفاده از کتترهای گایدینگ همراه باشد شامل موارد زیر است، اما به این موارد تنها محدود نمی شود:

- تشکیل ترومبوز/ آمبولی

- آمبولی هوا

- هماتوم در محل سوراخ شدن

- آسیب دیواره شریانی

- جدا شدن پلاک

- انفارکتوس میوکارد

- آریتمی های قلبی

- عفونت

- سوراخ شدن دیواره عروق

- واکنش آلرژیک به مواد حاجب

- انسداد عروقی

- اسپاسم عروقی

- سکنه مغزی و مرگ

• دستورالعمل استفاده:

۱. یک سیسم راهنمای PTFE و یا هیدروفیلیک با قطر مناسب برای استفاده با گایدینگ کتتر توصیه می شود.

۲. با استفاده از روش ورود عروقی انتخابی، کتتر را وارد رگ خونی کنید.

۳. کتتر به روی گایدیوایر به سمت جلو هدایت داده می شود تا به نقطه مورد نظر برسد.



استفاده مجزومد نشود



در صورت جلاوش شدن بسته بندی استفاده نشود



توجه: به دستورالعمل کاربری مراجعه شود



نور از تابش مستقیم نور خورشید



چور از رطوبت



محدوده ی خدایی



شکستی



تاریخ تولید



تاریخ انقضا

STERILE EO

سروین شده، با گاز اتیلن استرایل

LOT

شماره سری سلامت محصول

REF

کد محصول

GW

سیسم راهنما متعلق با کتتر

PSI

مدل کتتر میزان فشار قابل تحمل