

• توجه

این وسیله تنها باید توسط پزشک آموزش دیده در فرآیند آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی عروق قلبی و یا محیطی مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل کاربری را قبل از استفاده بدقت مطالعه نمایید. همهی هشدارها و نکات گفته شده را مشاهده نمایید. مسئولیت عوارض ناشی از عدم رعایت هشدارها یا عدول از این دستورالعمل صرفاً بر عهده استفاده کننده است.

• حوزه کاربرد

گایدوایر آنژیوگرافی PTFE یک وسیله پزشکی با کاربرد تهاجمی می باشد. این وسیله به منظور هدایت و کمک برای ورود و جایگذاری کتترهای زیر پوستی (Percutaneous) در نظر گرفته شده است.

• موارد منع مصرف

ندارد

• شرایط محیطی انبارش

این وسیله باید در شرایط محیطی خشک و خنک نگهداری شود. در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار داده نشود. لطفاً به نکات زیر توجه نمایید:

۱- این وسیله فقط توسط پزشک آموزش دیده مورد استفاده قرار گیرد.

۲- این وسیله با استفاده از گاز اتیلن اکساید سترون (استریل) شده است، در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا خدشه ای در بسته بندی، در استفاده از آن خودداری شود.

۳- این وسیله بصورت یکبار-مصرف می باشد بنابراین از دوباره سترون کردن و یا استفاده ی مجدد از آن خودداری شود.

۴- این وسیله نباید در فرآیندی استفاده شود که ساختار آن بصورت خودسرانه تغییر یابد.

۵- پس از استفاده از وسیله، طبق پروتکل ها و استانداردهای زباله های بیمارستانی دفع و امحا شود.

• ساختار و مشخصات

گایدوایر از یک مفتول به عنوان هسته و یک سیم بیج پوشش داده شده با تفلون (PTFE) فاقد PFOA به دور آن تشکیل شده است. مشخصات گایدوایر بطور کامل بر روی برجسب با رسم شکل ذکر شده است.

• دستورالعمل استفاده

۱- گایدوایر را از درون کتتر عبور دهید به نحوی که نوک گایدوایر از آن خارج شود و در مسیر رگ بصورت پیشرو نسبت به کتتر باشد. در صورت نیاز میتوانید از وسیله ای مانند تورکر (Torquer) جهت گرفتن گایدوایر استفاده کنید. کلاهک تورکر را بر روی گایدوایر محکم و ثابت کنید.

۲- تحت فلوروسکوپی با اشعه ایکس با دقت گایدوایر را به جلو هدایت کنید و چرخش لازم را به آن بدهید تا رگ مناسب را انتخاب کند. ۳- سپس نوک کتتر را در محل رگ انتخاب شده، در حالی که گایدوایر ثابت نگه داشته شده باشد، جایگذاری کنید.

• هشدار:

- قبل از استفاده نسبت به تاریخ انقضا اطمینان حاصل نمایید و از استفاده ی وسیله تاریخ گذشته خودداری شود.

- این وسیله برای حالت یکبار مصرف طراحی شده است، از استفاده ی دوباره یا سترون سازی مجدد آن خودداری شود.

- قبل از استفاده حتماً بدنه گایدوایر را بخوبی بررسی نمایید که عاری از هرگونه آلودگی، پلیسه، خراشیدگی و پوسته پوسته شدن باشد.

- نوک گایدوایر بخوبی بازبینی شود که کاملاً سالم باشد و هیچگونه جداشدگی و یا ناهمواری بر روی آن مشاهده نشود. در غیراین صورت از استفاده آن خودداری شود.



استفاده مجدد نشود



از استریل مجدد خودداری شود



در صورت مشاهده نشانی احتراق یا بسته بندی استفاده نشود



نوعه ۱ به دستورالعمل کاربری مراجعه شود



دور از تابش مستقیم نور خورشید



دور از رطوبت



محدوده ی دمای مشخصی



مشکلی



تاریخ تولید



تاریخ انقضا



مسترون شده با اتیلن اکساید



شماره سری ساخت محصول



کد محصول