

• توجه

- دستورالعمل کاربری را قبل از استفاده بدقت مطالعه نمایید. همه‌ی هشدارها و نکات گفته شده را مشاهده نمایید.
- عدم انجام این امر ممکن است باعث ایجاد عوارضی شود.

• شرح وسیله :

- کاتترهای آنژیوگرافی، کاتترهای داخل عروقی یکبار مصرف ، استریل و غیرقابل بازیافت هستند و به دو صورت فمورال و رادیال مورد استفاده قرار می گیرند.
- **موارد استفاده :**

کاتترهای آنژیوگرافی به گونه ای طراحی شده اند که برای رساندن ماده ی حاجب به ناحیه منتخب در سیستم عروقی همراه با روشهای تشخیصی معمول استفاده شوند. کاتترهای آنژیوگرافی ممکن است با نوارهای قابل مشاهده تحت اشعه ی ایکس جهت اندازه گیری های آناتومیکی نیز استفاده شوند.

• موارد عدم استفاده :

مشخص نیست (نامعلوم)

• هشدارها:

- اینوسپله فقط برای استفاده بصورت یکبارمصرف طراحی و در نظر گرفته شده است. از یکبارگیری مجدد آن خودداری کنید زیرا می تواند به طور بالقوه منجر به نقص عملکرد وسیله و افزایش خطر آلودگی و عفونت شود.
- کتر آنژیوگرافی را مستقل از سیم راهنما پیش نبرید.
- در صورت مقاومت در حرکت رو به جلو در کتر، بدون تشخیص شدن علت و انجام اقدامات اصلاحی ، سیم راهنما یا هر جزء دیگر را پیش نبرید.
- حداکثر فشار نامی (RBP) برای این کتر PSI است.

• موارد احتیاط:

- در صورت باز شدن یا آسیب دیدن بسته بندی، از آن استفاده نکنید.
- بعد از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- اتوکلاو یا استریل مجدد نکنید.
- با گرفتن هاب و بیرون آوردن آهسته آن از بسته، کاتتر را با دقت از بسته بندی خارج کنید.
- اگر هنگام بیرون کشیدن سیم راهنما از کتر مقاومت احساس میشود ، سیم راهنما و کتر را به صورت یک واحد با هم بیرون بکشید تا از آسیب احتمالی پیواره رگ جلوگیری شود.
- قبل از استفاده ، تمام وسایل ورودی به داخل عروق خونی را با سرم سالین هپارینه یا محلول ایزوتونیک مشابه شستشو دهید.

• عوارض جانبی

- تنها پزشکان آموزش دیده باید از کترهای آنژیوگرافی داخل عروقی استفاده کنند. عوارضی که ممکن است با استفاده از کترهای آنژیوگرافی همراه باشد عبارتند از:
- تشکیل ترومبوز/ آمبولی
- آمبولی هوا
- هماتوم در محل سوراخ شدن
- آسیب دیواره شریانی
- جدا شدن پلاک
- انفارکتوس میوکارد
- آریتمی های قلبی
- عفونت
- سوراخ شدن دیواره عروق
- واکنش آلرژیک به مواد حاجب
- انسداد عروقی
- اسپاسم عروقی
- سکنه مغزی و مرگ

• دستورالعمل استفاده:

1. یک سیم راهنمای PTFE و یا هیدروفیلیک با قطر مناسب برای استفاده با کترهای آنژیوگرافی توصیه می شود.
2. با استفاده از روش ورود عروقی انتخابی ، کتر را وارد رگ خونی کنید.
3. برای کتر PIGTAIL مجهز به صاف کننده هستند. بعد از اینکه نوک کاتتر روی سیم راهنما قرار گرفت ، جدا می شود.
- صاف کننده را به سمت جلو بکشید تا pigtail صاف شود.
- نوک کاتتر را روی سیم هدایت کننده قرار دهید و با کشیدن زبانه صاف کننده به سمت هاب ، صاف کننده را بردارید.



استفاده مجدد نشود



در صورت جابجایی نشدن بسته بندی استفاده نشود



توجه: به دستورالعمل کاربری مراجعه شود



نوار از تابش مستقیم نور خورشید



مورد از رطوبت



محدوده ی دمای



شستنی



تاریخ تولید



تاریخ انقضا

STERILE EO

سرور شده با گاز اتیلن اکساید

LOT

شماره راهنما ساخت محصول

REF

کد محصول

GW

سیم راهنما متعلق با کتر

PSI

حداکثر میزان فشار قابل تحمل