



استفاده مجدد نشود



از استریل مجدد خودداری شود



در صورت مجوش شدن بسته بندی استفاده نشود



توجه: به دستورالعمل کاربری مراجعه شود



نور از تابش مستقیم نور خورشید



مورد از رویت



محدوده ی خاصی



شکستگی



تاریخ تولید



تاریخ انقضا



مستریل شده با گاز اتیلن اکساید



شماره سری ساخت محصول



کد محصول

● توجه

این وسیله تنها باید توسط پزشک آموزش دیده در فرآیند آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی عروق قلبی و یا محیطی مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل کاربری را قبل از استفاده بدقت مطالعه نمایید. همه ی هشدارها و نکات گفته شده را مشاهده نمایید.  
- مسئولیت عوارض ناشی از عدم رعایت هشدارها یا عدول از این دستورالعمل صرفا بر عهده استفاده کننده است.

● حوزه کاربرد

شیت شریانی وسیله ای یکبار مصرف جهت ورود وسایل به درون رگ فمورال و یا رادیال در عملهای اینترونشن میباشد.

● موارد منع مصرف

با توجه به نظر پزشک مبنی بر اینکه برای چه بیماری ای عمل اینترونشن مناسب است موارد منع مصرف تعیین میگردد.

● شرایط محیطی انبارش

این وسیله باید در شرایط محیطی خشک و خنک نگهداری شود. در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار داده نشود. لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

- ۱- این وسیله فقط توسط پزشک آموزش دیده مورد استفاده قرار گیرد.
- ۲- این وسیله با استفاده از گاز اتیلن اکساید سترون (استریل) شده است، در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا خدشه ای در بسته بندی، در استفاده از آن خودداری شود.
- ۳- این وسیله بصورت یکبارمصرف میباشد؛ بنابراین از دوباره سترون کردن و یا استفاده ی مجدد از آن خودداری شود.
- ۴- این وسیله نباید در فرآیندی استفاده شود که ساختار آن بصورت خودسرانه تغییر یابد.

● دستورالعمل استفاده

- ۱- بر روی پوست در محل مورد نظر برای ورود شیت یک برش کوچک تحت بی حسی ایجاد کنید.
- ۲- با استفاده از سوزن موجود در مجموعه شیت یک مجرای ورودی به درون رگ ایجاد نمایید.
- ۳- بعد از ایجاد مجرای مناسب به درون رگ، گایدوایر موجود در مجموعه شیت را وارد رگ نمایید.
- ۴- سوزن را از انتهای گایدوایر خارج نمایید و مجموعه شیت به همراه دایلاتور را از روی گایدوایر به درون رگ هدایت نمایید.
- ۵- دایلاتور را آزاد کرده و به همراه گایدوایر خارج سازید.

● هشدار

- قبل از استفاده ، مجموعه شیت (شامل شیت، دایلاتور ، گایدوایر و سوزن آن) بخوبی بازبینی شود که دچار هیچگونه آلودگی ، نقص و ناهمواری ، تاخوردگی ، شکستگی و پلیسه در سطح آن نباشد.
- قبل از استفاده، از اتصال مناسب لوله دایلاتور به هاب و همینطور لوله ی شیت به هاب آن اطمینان حاصل کنید.
- قبل از استفاده نوک شیت و دایلاتور، سوزن و گایدوایر بازبینی شوند که دچار هیچگونه آسیبی نباشند.
- قسمت نوک گایدوایر بخوبی بازبینی شود که دچار هیچگونه نقص و ناهمواری نباشد.
- پس از استفاده ، محصول بر طبق پروتکل های بهداشتی و دفع زباله های بیمارستانی امحا شود.